


ВСТУП

Вібромасажна портативна куля Complex Molecule™ для точного масажу тригерних точок має 4 режими інтенсивності вібрації для полегшення сильного та/або ниючого болю в м'язах, зменшення відчуття забитості м'язів. Пристрій покращує кровообіг у ділянках тіла, на яких застосовується, знімає больові відчуття та набряк м'язів. Complex Molecule™ можна використовувати як для розігрівання м'язів перед тренуванням, так і для відновлення після занять.

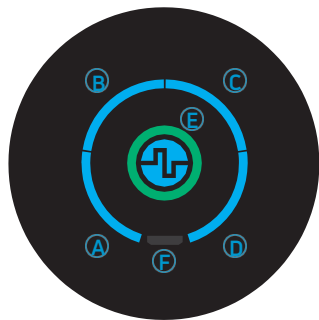

- A** Режим 1 - 1700 об/хв
- B** Режим 2 - 1900 об/хв
- C** Режим 3 - 2200 об/хв
- D** Режим 4 – 2200-1700 об/хв
- E** Індикатор рівня заряду батареї
- F** USB порт для зарядки (5В 2А)

ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ



<20% 40% 60% 80% >80%

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ШВИДКІСТЬ 1	ШВИДКІСТЬ 2	ШВИДКІСТЬ 3	ШВИДКІСТЬ 4	ПРИМІТКА
Шум(дБ)		<54дБ	-	-	54дБ	За умови дистанції 30см
Частота (Гц)		28,33Гц	31,67Гц	36,67Гц	28,3-36,6Гц	
Швидкість обертання двигуна (з навантаженням), об/хв		1700	1900	2200	1700-2200	
Енерго-споживання	Напруга (В)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Сила струму (А)	0.29	0,41	0,91	0,8	
	Потужність (Вт)	2,35 Вт	3,3 Вт	7,2 Вт	6,3 Вт	
Тривалість зарядки та автономної роботи пристрою	Тривалість зарядки	1.5 год				
	Тривалість автономної роботи				1-1,5 год	Кожні 15 хвилин роботи автоматично зупиняється на один цикл
Адаптер живлення	За стандартами США AC100 ~ 240В 50/60 Гц, вихід 5В 2А. 1,5 м USB-кабель для зарядки (сертифікація: uL / ETL ROHS)					
Акумулятор/батарея	7.4В 1200мА*год Літій-полімерна батарея (2 секції)					

ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Пристрій має 4 режими інтенсивності вібрації. Щоб увімкнути / вимкнути живлення, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, поки індикатор живлення не засвітиться/не вимкнеться. Щоб обрати бажаний рівень інтенсивності вібрації, натискайте кнопку живлення для переходу від одного режиму до іншого. Світловий індикатор синього кольору вказуватиме вибраний режим.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не рекомендується розряджати акумулятор менше ніж на 20% протягом тривалого періоду часу. Будь ласка, повністю зарядіть пристрій, щоб уникнути розрядки акумулятора, якщо він працював в режимі автономної роботи і залишилося менше 25 % заряду акумулятора.
- У кожному режимі пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин використання.



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДПОВІДНО ДО НАСТУПНИХ ІНСТРУКЦІЙ:

- Особам до 18 років застосовувати лише під наглядом дорослих осіб.
- В разі будь-якого дискомфорту – негайно припиніть використання кулі.
- Уникайте контакту кулі з головою, кістками та суглобами.
- Застосовуйте масажер не більше 1 хвилини на кожній окремій ділянці тіла. Масажуйте лише м'язи, уникаючи кістки та суглоби.

- Уникайте контакту пальців, рук та/або волосся з увімкненим пристроєм.
- Не кидайте Complex Molecule™ на підлогу
- Даний пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли особа, відповідальна за їх безпеку, не отримувала вказівок чи інструкцій щодо використання приладу.
- Зберігати в недоступному для дітей місці
- Прилад слід використовувати лише з блоком живлення <модель ICP15A-050-2000B>, що постачається з приладом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що постачається з цим приладом.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

БУДЬ ЛАСКА, НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ COMPLEX MOLECULE™ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ ЗА НАСТУПНИХ УМОВ:

- Нещодавні хірургічні втручання будь-якого типу
- Будь-які видозміни шкіри, такі як: почервоніння, гематоми, опіки, запалення
- Грижі міжхребцевих дисків
- Вагітність
- Діабет/невропатія або пошкодження сітківки
- Вживлений кардіостимулятор
- Травми, на які може вплинути вібротерапія
- Епілепсія та/або мігрені
- Спондилолітез
- Деформація/ригідність хребта
- Нещодавня заміна суглобів або ВМС
- Вживлені металеві спиці/пластини
- Присутні інші фактори, що погіршують стан здоров'я

УВАГА

- Не використовуйте на травмованих ділянках тіла.
- Не занурюйте пристрій у воду, пісок та/або дрібне сміття, що може потрапити до вентиляційного отвору двигуна.
- Не викручуйте гвинти та не намагайтесь розібрати пристрій.
- Акумулятор пристрою не замінюється.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Можливе подразнення шкіри та невеликі синці в разі масажування більше 60 секунд на одному місці або на кістлявих ділянках. Побічні ефекти можуть виникати у людей, які нещодавно перенесли операції, мають шкірні захворювання, рани, нервові захворювання, переломи кісток та/або контузії. З метою запобігання виникнення подібних реакцій, користувачі повинні проконсультуватися з лікарем перед застосуванням масажера.

ПРАВИЛА ЗАРЯДКИ

1. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.
2. Під час заряджання індикатор рівня заряду батареї поступово забарвлюватиметься в зелений колір в залежності від фактичного рівня заряду акумулятора.
3. Пристрій не можна використовувати під час зарядки.
4. Будь ласка, використовуйте адаптер, що додається. Не використовуйте інші адаптери, щоб уникнути пошкодження акумулятора та потенційної небезпеки.
5. Час зарядки акумулятора 1, 5 год.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Заява про відповідність частині 15В Правил FCC
Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація пристрою регулюється двома наступними умовами: (1) Пристрій не може спричиняти перешкод для функціонування інших приладів чи здоров'я. (2) Пристрій приймає будь-які перешкоди, включаючи такі, що можуть спричинити перебої в його роботі.

COMPEX вібромасажна портативна куля
Модель: CX202WL03
Живлення: Літій-полімерна батарея (7.4В,1200мА*год,8.88 Вт*год)
Номинальний вхід:5В2А
Декларована потужність: Макс. 12Вт
Використовувати лише блок живлення <ICP15A-050-2000В>



УМОВИ ГАРАНТІЇ

Цей пристрій має гарантію на один рік від дати продажу. Гарантія поширюється лише на пристрій без аксесуарів. Протягом гарантійного терміну дефектні частини будуть відремонтовані або замінені безкоштовно. Будь-яке зовнішнє втручання в роботу пристрою, зловживання чи навмисне пошкодження, призводять до втрати цієї гарантії. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з **дистриб'ютором**.