

Керівництво для швидкого старту

**AYRE™
WIRELESS RAPID-RECOVERY
COMPRESSION BOOTS**
безпроводні компресійні ногавиці для
швидкого відновлення



Ауре™ Ногавиці

- A Нейлонові ногавиці 420D
- B Гачок та петля
- C Застібка-блискавка
- D D1, D2, D3, D4 (Манжети/ камери)



Ауре™ Пульт дистанційного керування

- 1 Кнопка ввімкнення/ вимкнення живлення
- 2 Літій-іонний акумулятор
- 3 Вилка живлення
- 4 Кнопка налаштування

Застосування

Comrex® Augre™ застосовують для полегшення:

- Сильного та/або ниючого болю у м'язях, що виникає після фізичних вправ чи інших видів активності. Завдяки апарату, ви зможете повернутися до звичного руху на повну силу вже наступного дня.

- Гострого болю або набряків у м'язях, проблем із судинами у пацієнтів із діагнозом діабет.

- Цей пристрій не є медичним засобом і не застосовується в клінічних умовах та медичних закладах.

Протипоказання до застосування

Пристрій не можна використовувати:

- Пацієнтам з підозрою, активною стадією чи важкою формою глибокого тромбозу вен, ішемічними судинними захворюваннями, важкою формою атеросклерозу, набряком легенів, важкою формою серцевої недостатності, тромбофлебітом, або в стадії активної інфекції.

- На ногах, де манжети погіршуватимуть такі стани: перев'язка вен, гангрена, дерматит, відкриті рани, нещодавня пересадка шкіри, сильний набряк чи важка форма деформації ноги.

- При будь-якій формі невropатії. Не використовувати пацієнтам з втратою чутливості кінцівок та/або відчуття болю.

- На ділянках, де посилення зворотного венозного кровообігу є небажаним та/або небезпечним для здоров'я.

Застереження

- Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно.

- Не намагайтеся знімати або відкривати кришки.

- Не виймайте насос із манжети.

- Не намагайтеся покращувати чи змінювати конструкцію пристрою.

- НІКОЛИ не здійснюйте будь-яких ремонтних робіт апарату при його застосуванні.

- Не працюйте з апаратом у вологому середовищі.

- В жодному разі не занурюйте апарат у будь-яку рідину. Інструкції щодо очищення див. у розділі «Очищення та дезінфекція».

- Не кладіть пристрій в автоклав з будь-якої причини.

- Не застосовуйте поблизу апарату легкозаймистих речовин, таких як, наприклад, суміш азоту з киснем або оксидом азоту.

- У разі перебування приладу в екстремально низькій або високій зовнішній температурі перед застосуванням, дайте пристрою нагрітись або охолонуть до кімнатної температури.

- Оберегайте пристрій від падіння чи удару, пошкодження насоса.

- Цей пристрій може впливати на портативне та мобільне обладнання радіочастотного зв'язку.

Запобіжні заходи

- Припиніть застосування приладу, якщо виник набряк, подразнення шкіри та/або відчуття дискомфорту та проконсультуйтеся із лікарем.

- Одразу послабте манжети, якщо виникне пульсація або посмикування. Це означає, що манжети затягнуті занадто сильно.

- Пацієнтам, які страждають на цукровий діабет або судинні захворювання, що потребують частого огляду шкіри, перед застосуванням пристрою слід звернутися за консультацією лікаря.

- Пацієнтам, які застосовують зігріваючі пристрої з манжетами, що потребують часті оцінки стану шкіри, перед застосуванням пристрою звернутися за консультацією лікаря.

- Людям, котрі страждають від ліпому хребта (жировик) або потребують особливого догляду в положенні лежачи (з манжетами або без них) або страждають на тунельний синдром кінцівок, перед застосуванням апарату звернутися за консультацією лікаря.

Інструкція для швидкого старту

Прочитайте інструкцію з застосування (Доступна на сайті: comrex.com.ua)

- Одягніть ногавиці на ноги.

- Надійно закріпіть їх за допомогою гачка та застібки-блискавки.

- Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення протягом 1 секунди, щоб увімкнути пристрій.

- За замовчуванням пристрій починає роботу в режимі F1, що накачає кожну з чотирьох камер до оптимального рівня позначки тиску. Щоб змінити налаштування режиму та тиску, прочитайте повну інструкцію користувача.

- Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення протягом 1 секунди, щоб вимкнути пристрій.

Зарядка пульта дистанційного керування

Переконайтесь, що зарядний штекер підходить до вилки живлення електромережі і сумісний із зарядним пристроєм. Індикатор заряду акумулятора блиматиме в процесі зарядки до повного завершення процесу. Апарат можна застосовувати під час зарядки.

Технічна підтримка

Тел: +38 (067) 303 23 70

E-mail: medisport@ukr.net

COPYRIGHT © 2020 by DJO, LLC

Individual results may vary. Neither DJO, LLC nor any of its subsidiaries dispense medical advice. The contents of this document do not constitute medical advice. Rather, please consult your healthcare professional for information on the courses of treatment, if any, which may be appropriate for you

DJO, LLC
A DJO Global Company
430 Decision Street
Vista, CA 92081-8553
U.S.A.
CX202IF02