

FASCIQ®

FASCIQ MINI МАСАЖНИЙ ПІСТОЛЕТ G8

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Уважно прочитайте посібник перед тим, як скористатися даним масажером.
Будь ласка, збережіть цей посібник користувача для використання в майбутньому.

Масажний пістолет FASCIQ Mini G8 — це перкусійний масажер, розроблений компанією THYSOL Group B.V під торговою маркою (лінійкою продуктів) FASCIQ. Цей пристрій ідеально доповнює поточну колекцію продуктів FASCIQ та забезпечує додаткове лікування фасції і м'яких тканин.

Масажний пістолет FASCIQ Mini G8 тихий (рівень шуму нижче 40 дБ) і водночас достатньо потужний (потужність двигуна 92 Вт із силою удару 12.5 кг). Глибина ходу масажера сягає до 8 мм, а тривалість автономної роботи батареї досягає 12 годин. Він невеликий і простий у використанні (0,55 кг, 14 x 5 см) з корпусом із твердого сплаву.

Уникайте будь-яких люфтів або віддачі, що особливо важливо для професійних користувачів, які довго працюють. 4 швидкості масажера дозволяють підібрати найоптимальніший режим роботи з фасціями, м'якими тканинами та різними групами м'язів з правильною частотою від 1700 до 3200 ударів/хв.

Цей унікальний високоефективний пристрій ідеально підходить як для приватних користувачів, так і для професіоналів. В терапевтичних цілях може використовуватися в спорті, фітнесі, під час тренувань, а також в поєднанні зі спа- та естетичними процедурами на тілі.

Супроводження та гарантійне обслуговування забезпечуються Thysol GROUP B.V.

ВИКОРИСТАННЯ

Для полегшення м'язової скутості та жорсткості, покращення кровообігу і пришвидшення відновлення м'язів.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Щоб зменшити ризик виникнення несправностей, ураження електричним струмом, травм, пожежі, смерті та пошкодження обладнання, прочитайте всі інструкції та застереження щодо роботи масажера в даному посібнику перед його використанням.



НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ДО МАСАЖНОЇ ГОЛОВКИ, ЯКЩО МАСАЖНА НАСАДКА НЕ ПРИКРІПЛЕНА.

ЗМІСТ

Важлива інформація.....	4
Опис пристрою.....	5
Масажні насадки.....	6
Зміна масажних насадок.....	7
Інструкція по використанню.....	8
Специфікація.....	9
Комплектація.....	11
Встановлення і усунення несправностей.....	12
Фізіотерапевтичний ефект.....	13
Обслуговування.....	14
Особливості.....	15

УВАГА!

1. Зберігати в недоступному для дітей місці!
2. Не занурюйте пристрій у воду.
3. Уникайте контакту з вогнем та іншими джерелами тепла.
4. Не використовуйте пристрій в ділянках голови та шиї, в області серця або статевих органів.
5. Не використовуйте пристрій на кістках, використовуйте цей пристрій лише на ділянках м'яких тканин тіла, не спричиняючи болю чи дискомфорту.
6. Не кидайте цей пристрій навмисно.
7. Не намагайтеся розібрати виріб, окремі вузли чи механізми.
8. Не використовуйте цей пристрій для заміни або доповнення до лікування. Якщо у вас біль, ви проходите лікування або використовуєте інші медичні прилади, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням даного пристрою.
9. Не наближайте пальці, волосся чи інші частини тіла до з'єднання між масажною головкою та підшипником, щоб уникнути защемлення.


Якщо у Вас є будь-які із наведених нижче станів або будь-які проблеми зі здоров'ям, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед використанням цього пристрою!

1. Вагітність, діабет і такі ускладнення, як невропатія та пошкодження сітківки.
2. Використання кардіостимулятора, нещодавнє хірургічне втручання, епілепсія або мігрень, грижа поперекового диска, зміщення хребців і кісток вперед.
3. Нещодавня операція із заміни суглобів, встановлення внутрішньоматкових протизаплідних засобів, металевих імплантатів; чи інші особливості власного тіла.

Тривають дослідження щодо впливу сеансів вібромасажів на конкретні медичні захворювання. Це, швидше за все, зменшить перераховані вище протипокази. Практика показала, що в багатьох випадках введення вібромасажів в протокол лікування покращує ефективність лікування. Це повинно проводитися за порадою або в супроводі лікаря, спеціаліста або фізіотерапевта.

ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Масажна насадка
2. Індикатор швидкості масажу
3. Багатофункціональна кнопка
 - Вмикання/вимкнення (утримуйте кнопку протягом 1,5 секунд)
 - Збільшення швидкості масажу (коротке натискання)
4. Порт для зарядки micro USB
5. Індикатор рівня заряду батареї

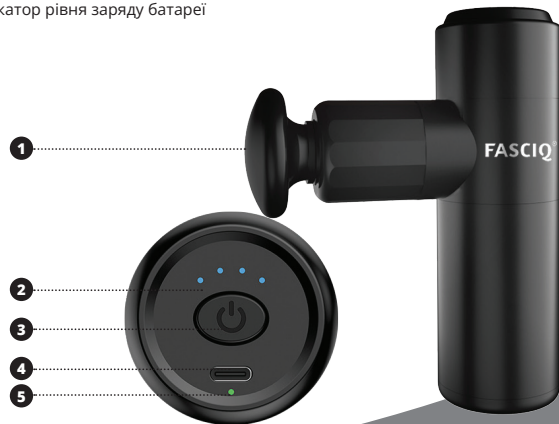

МАСАЖНІ НАСАДКИ



Плоска насадка
підходить для розслаблення та
формування м'язів різних частин тіла.



Насадка **патрон**
для глибокого масажу тригерних
точок, кистей рук, долонь, стоп.




U-подібна насадка
підходить для масажу в ділянці
хребта та п'яtkового сухожилку.



Насадка **куля**
підходить для масажу м'язів рук,
талії, бедер, стегон тощо.

ЗМІНА МАСАЖНИХ НАСАДОК

Коли пристрій вимкнений, повільно вставте масажну насадку в отвір. Як показано на малюнку нижче, положення уявної червоної лінії масажної насадки має порівнятися з такою ж червоною лінією масажера.

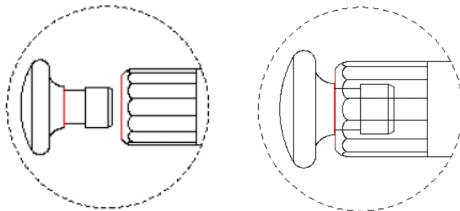

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

1. Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 1,5 секунд, щоб увімкнути. Швидкість по замовчуванню-найповільніша.
2. Кожен короткий натиск на багатофункціональну кнопку збільшує швидкість вібрації на 1 рівень. При ввімкненні першої швидкості-горить одна лампочка, загалом чотири рівні швидкості і 4 лампочки відповідно.
3. Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 1,5 секунд, щоб вимкнути пристрій.
4. Коли живлення ввімкнено, індикатор рівня заряду батареї швидко блимає (4 Гц) певну кількість разів відповідно до рівня заряду батареї, блимає 1 раз (0-30%), блимає 2 рази (30-70%), блимає 3 рази (70-100%) і повторюється кожні 5 секунд.
5. Під час зарядки завжди горить червоний світлодіод, при повній зарядці – зелений світлодіод. Не використовуйте під час зарядки.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Специфікація FASCIQ масажний пістолет (THYSOL)

Назва	FASCIQ масажний пістолет MINI
Тип	G8
Переваги	Невеликий, простий, стильний, металевий корпус, амплітуда ходу 7 мм, безщітковий двигун з високим крутним моментом, висока частота обертів, 12-годинна супербатарея, батарея 2600 МА, чотири швидкості які можна регулювати, чотири професійні масажні насадки, безшумний (нижче 45 дБ)
Двигун	Високопотужний безщітковий двигун (Є42 великий двигун, технологія зниження шуму 45 дБ, внутрішня подушка) 3200 об/хв
Батарея	2600МА (12.6 В напруга батареї) - літій-іонна батарея 2600
К-сть передач	Чотири
Тип управління	Фізичні кнопки
Витривалість	Автономна робота батареї-12 год. Тривалість повної зарядки 2-3 год
Порт для зарядки	Type-C
Структура	Монолітний
Колір	Чорний з лого FASCIQ
Основний матеріал	Високоякісний алюмінієвий сплав
Вага	0.5 кг

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Опис швидкостей (кількість ударів за хвилину):

No.1	Розігрів м'язів (1700)
No.2	Розслаблення фасції (2200)
No.3	Виведення молочної кислоти (2700)
No.4	Глибокий масаж(3200)

Опис масажних головок

Насадка куля	Підходить для масажу м'язів рук, талії, бедер, стегон, литок і т.д.
U-подібна насадка	Підходить для масажу ділянки шиї, хребта та п'яtkового сухожилка
Плоска насадка	Підходить для розслаблення та формування м'язів різних частин тіла
Насадка патрон	Підходить для глибокого масажу тригерних точок, кистей рук, долонь, стоп.

Інша інформація:

Комплектація	валіза для зберіння, фасціальний масажний пістолет, Usb type c кабель, масажні насадки (4), зарядний пристрій
Амплітуда (хід)	до 8 мм
Сила удару	12.5 кг
Потужність	92 Ват (Вт)

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Масажний пістолет
2. Валіза для зберігання
3. Usb type-c кабель для зарядки
4. Плоска масажна насадка
5. Масажна насадка куля
6. U-подібна масажна насадка
7. Масажна насадка патрон
8. Зарядний пристрій



ВСТАНОВЛЕННЯ І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Масажний пістолет не вмикається

1. Температура занадто низька

Якщо масажний пістолет перебувати в середовищі нижче 0 градусів за Цельсієм протягом тривалого часу, його батарея замерзає, і пристрій не може нормально запуститися. Інколи він може ввімкнутися, але працює при цьому некоректно.

Вирішення

Помістіть масажний пістолет в середовище з температурою повітря вище 0 градусів за Цельсієм на 2 години.

2. Низький заряд батареї

Коли батарея розряджена і не заряджається протягом тривалого часу, акумулятор переходить у режим енергозбереження. В таких випадках після ввімкнення масажний пістолет може працювати некоректно.

Вирішення

Не вмикайте його не переконавшись, що батарея повністю заряджена.

ПОМИЛКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Пристрій не працює: перевірте рівень заряду батареї. Її потрібно заряджати біля 4 годин, якщо масажний пістолет не використовувався протягом тривалого часу.
2. На панелі управління не горять сигнальні лампочки: перевірте рівень заряду батареї.
3. Початковий шум під час використання: в період обкатки нового пристрою - це нормально. Якщо шум стає голоснішим після використання масажера протягом певного періоду - зверніться до продавця для перевірки.
4. Неможливо зарядити батарею: батарея старіє або поганий контакт- зверніться в сервісний центр.

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЕФЕКТ

Вплив на шкіру та підшкірні тканини

Розслабляє потовщену сполучну тканину, фасцію, руйнує бар'єр, який провокує фасціальне скорочення; зменшує спайки і внутрішню рубцеву тканину після операції або травми; посилює венозний відтік і лімфообіг; покращує пластичність м'язів, особливо у випадках м'язових спазмів або скутості, стимулює рефлекторне скорочення м'язових волокон, збільшує діапазон рухів, зменшуючи скутість суглобів, збільшує амплітуду рухів за рахунок усунення скутості суглобів.

Вплив на центральну та симпатичну нервову систему

Стимулює місцеві м'язові рецептори, щоб зменшити біль і допомогти розслабити м'язи задля запобігання запальним процесам. Найпоширенішими причинами м'язового болю є травма, надмірне навантаження, напруга. Після травми шокова терапія може прискорити загоєння запаленої ділянки. Подібним чином, коли певні частини тіла перевантажуються або перенапружуються, шокова терапія може прискорити кровообіг до уражених частин і зменшити потенційну напругу.

Спортивна реабілітація

Релаксаційна фізіотерапія допомагає тілу відновитися після інтенсивного фізичного навантаження, сприяє виведенню метаболічних відходів та покращує постачання поживних речовин за рахунок підвищення еластичності тканин.

Релаксація

Ударна фізіотерапія може відновити організм, поліпшити загальний стан та благополуччя тіла.

ОБСЛУГОВУВАННЯ / ЧИЩЕННЯ / ЗБЕРІГАННЯ / ТРАНСПОРТУВАННЯ

1. Очистіть пристрій вологим рушником, потім витріть насухо м'якою сухою тканиною.
2. Зберігайте та транспортуйте масажер у валізі, з якою він постачається.
3. Зберігайте пристрій в сухому, добре провітрюваному, в неагресивному газі місці, на відстані від землі не менше 250 мм з кількістю укладених слоїв не більше 5.
4. Якщо масажер не використовується протягом тривалого часу, його слід очистити, належним чином упакувати і зберігати відповідно до рекомендацій та заряджати кожні шість місяців.
5. Пристрій можна перевозити автомобільним, залізничним, морським та авіатранспортом.
6. Під час транспортування пристрій слід зафіксувати з метою запобігання сильній вібрації, зіткненням, перекочуванням або падінню, і покласти його вгору, убезпечивши від потрапляння води.

УНІКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ FASCIQ MINI МАСАЖНИЙ ПІСТОЛЕТ G8

- Тихий (40-45 дБ)
- Сила удару 12.5 кг
- Зручно розташовується в руці
- Вібрація на руку не передається
- Чудовий зовнішній вигляд і відчуття
- Кількість ударів за хвилину до 3200



THYSOL GROUP BV

Josink Kolkweg 18
7545 PR Enschede
The Netherlands

 @fasciq_official

 @fasciq

www.fasciq.com